

## GEBRAUCHSANWEISUNG

# STERISIAL<sup>®</sup> Mundspray

### Was ist STERISIAL Mundspray?

STERISIAL Mundspray ist ein künstlicher Speichelerersatz zur Befeuchtung des Mundraumes.

STERISIAL Mundspray enthält **kein Konservierungsmittel**.

### Was ist in STERISIAL Mundspray enthalten?

STERISIAL Mundspray enthält Hyaluronsäure-Natrium, Natriumchlorid, Phosphatpuffer und gereinigtes Wasser.

### Welche Eigenschaften hat STERISIAL Mundspray?

STERISIAL Mundspray ist ein künstlicher Ersatzspeichel, der in seinen Eigenschaften dem natürlichen Speichel nachempfunden ist.

STERISIAL Mundspray befeuchtet die Mundhöhle und sorgt für unmittelbare Erleichterung der Symptome.

Im Allgemeinen hält die Wirkung mindestens eine halbe Stunde an.

### Anwendungsgebiete

#### Wofür wird STERISIAL Mundspray verwendet?

STERISIAL Mundspray dient zur anhaltenden Befeuchtung des Mundraumes in Fällen von Trockenheit verschiedenster Ursache.

### Dosierung und Art der Anwendung

#### Wie sollen Sie STERISIAL Mundspray anwenden?

Sprühen Sie mehrmals täglich, je nach individuellem Bedarf, einige Sprühstöße in den Mund ein.

Die Anwendung kann über einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden (es besteht keine Gefahr einer Überdosierung).



Entfernen Sie vor der Anwendung die Schutzkappe und führen Sie bei Bedarf einige Pumpvorgänge durch, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Nun ist STERISIAL Mundspray anwendungsbereit.

Halten Sie die Flasche beim Sprühen möglichst aufrecht. Das Ansaugrohr muss in jedem Fall in die Flüssigkeit ragen.

Falls die Funktionstüchtigkeit des Sprühkopfes beeinträchtigt ist, sollte der Pumpmechani-

mus mehrmals in senkrechter Stellung betätigt werden, bis der Sprühnebel wieder austritt. Verschließen Sie nach der Anwendung die Sprühflasche wieder mit der Schutzkappe.

### Wann sollen Sie STERISIAL Mundspray nicht anwenden?

Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen Bestandteil des Präparates sind.

### Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

STERISIAL Mundspray ist kein Arzneimittel! Bei anhaltenden Beschwerden sollte unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Es bestehen keine Bedenken gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheitserregern sollte eine Sprühflasche jeweils nur **von ein und derselben Person** benützt werden.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren!

### Packungsgröße:

Flasche mit 20 ml steriler Lösung, mit Sprühaufsatz.

1 Sprühstoß = 0,14 ml.

### Haltbarkeit:

Durch das spezielle Filtersystem bleibt die Lösung auch nach wiederholter Anwendung steril.

STERISIAL Mundspray kann daher bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum verwendet werden.

### Lagerungshinweise:

<sup>25°C</sup> Nicht über 25 °C lagern.

Lichtschutz erforderlich

### Hersteller:

MoNo chem-pharm Produkte GmbH  
Leystraße 129, A-1200 Wien

0123

### Vertrieb:

SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH  
A-1200 Wien

Stand der Information: November 2019

STERILE A

sterilisiert durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken