

CIONAL®



**Gebrauchsanweisung
für dieses Medizinprodukt.
Bitte sorgfältig lesen.**

CIONAL® – ein Konzentrat zur Anwendung in der Mundhöhle

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen wie dieses Medizinprodukt anzuwenden ist. Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte CIONAL jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden. Bitte suchen Sie Ihren Zahnarzt, Arzt oder Apotheker auf wenn Sie weitere Informationen benötigen.

CIONAL®

Sie können CIONAL verwenden, wenn Sie unter

- Zahnfleischbluten und/oder
- Reizungen, Entzündungen

des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut leiden. Sie können CIONAL ebenfalls zur Vorbeugung anwenden. CIONAL hat adstringierende Eigenschaften, das heißt es zieht das Zahnfleisch zusammen, verdichtet damit das Gewebe und bildet so eine mechanische Barriere auf der Mundschleimhaut. CIONAL schützt damit die entzündete Schleimhaut vor weiteren Reizungen und erleichtert damit die Heilung.

CIONAL enthält:

10 g CIONAL (entsprechen 9,6 ml) enthalten: 0,909 g Aluminiumformiat 3-H₂O. Die sonstigen Bestandteile sind: Bitterfenichelöl, Ethanol 96 % (v/v), Macroglycerohydroxystearat (Ph.Eur.), Nelkenöl, Propylenglykol, Sorbitol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser, Zuckercouleur (E150c).

CIONAL ist ein Medizinprodukt in Form eines Konzentrats. Die Lösung enthält Aluminiumformiat und kann als Verdünnung verwendet werden um die Mundhöhle zu spülen und auch unverdünnt zum Betupfen der betroffenen Bereiche im Mund.

Bitte verwenden Sie CIONAL nicht wenn Sie überempfindlich sind gegen Aluminiumformiat oder einen der sonstigen Bestandteile. Verwenden Sie CIONAL nicht bei Kindern unter 12 Jahren.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von CIONAL

Macroglycerohydroxystearat und Propylenglykol können Hautreizungen hervorrufen. CIONAL enthält 12,4 Vol.-% Alkohol.

Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung des Medizinproduktes bei Schwangeren und in der Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungsergebnisse vor. CIONAL sollte deshalb von diesen Personengruppen nicht angewendet werden. Wechselwirkungen mit Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Wie wenden Sie CIONAL an?

- CIONAL kann unverdünnt auf die betroffenen Stellen im Mund aufgetupft werden
- Zum Spülen oder Gurgeln verdünnt man CIONAL (10-30 Tropfen in 100 ml Wasser)



**Zum Spülen
oder Gurgeln**

Auch unverdünnt
lokal mit Pinsel
oder Wattestäbchen
gezielt anwendbar

- Für die Mundhygiene können Sie einige Tropfen CIONAL in den Wassertank Ihrer Munddusche hinzufügen

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre gurgeln oder spülen mehrmals täglich oder betupfen die betroffenen Bereiche des Mundes mit einem Wattestäbchen oder einem Pinsel. Geben Sie bei Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündung circa 10 bis 30 Tropfen in 100 ml Wasser (etwa ein halbes Glas).

Die Anwendung sollte nach den Mahlzeiten und dem Zähneputzen erfolgen. Danach sollten Sie den Mund für mindestens 15 Minuten nicht spülen damit CIONAL gut einwirken kann.

Als Zusatz zur Munddusche werden täglich ein paar Tropfen in das Wasser des Tanks hinzugefügt. Munddusche und Tank anschließend mit klarem Wasser reinigen. Sollten Sie nach der Anwendung von CIONAL ein rauhes oder trockenes Gefühl im Mund haben, so ist dies die beabsichtigte Wirkung von CIONAL. Wenden Sie CIONAL gemäß dieser Anleitung an.

Bei Unsicherheiten oder bei Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut die länger als 1 Woche andauern, suchen Sie bitte einen Zahnarzt, Arzt oder Apotheker auf.

Welche Nebenwirkungen kann CIONAL haben?

Nur sehr selten kommt es bei Menschen, die CIONAL verwenden zu einer Überempfindlichkeitsreaktion (allergischen Reaktion). Die Hilfsstoffe Propylenglykol und Macroglycerohydroxystearat können die Haut reizen.

Wie bewahre ich CIONAL auf?

Bitte bewahren Sie CIONAL außer Sicht und Reichweite von Kindern auf. Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Etikett und auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie bitte diese Packung nach dem Verfallsdatum nicht mehr.

Lagerbedingungen

Nicht bei Temperaturen über 25°C aufbewahren! Nach Anbruch ist CIONAL 3 Monate haltbar. Ausfällungen sind möglich, haben aber keinen Einfluss auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit von CIONAL. Entsorgen Sie leere Flaschen und Umkartons in den Hausmüll.

Hersteller:

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87-93
D-65203 Wiesbaden

www.kreussler.com - E-Mail: info@kreussler.com

Apothekenexklusiv



Für Kinder unzugänglich aufbewahren