

NOICLA® ALOE+ Nasenspray 30 ml - Medizinprodukt

Lesen Sie die gesamte in der Packung enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen für den Patienten über die Verwendung des Produkts NOICLA® ALOE+ enthält, und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den Fall auf, dass Sie sie erneut lesen müssen.

1. Was ist NOICLA® ALOE+?

NOICLA® ALOE+ ist eine isotonische Lösung aus Meerwasser mit wertvollen Mineralien, angereichert mit Hyaluronsäure (Natriumhyaluronat) und Aloe-Extrakt, die ausgetrocknete und gereizte Nasen- und Nebenhöhlenschleimhäute intensiv befeuchtet.

NOICLA® ALOE+ ist für Säuglinge ab 6 Monaten, Kinder und Erwachsene geeignet.
Es enthält keine Konservierungsmittel und kein Treibgas.

2. Wofür wird NOICLA® ALOE+ verwendet?

Trockene Schleimhäute und eine verstopfte Nase sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ein ständiges Problem. Erkältungen, Allergien, der Aufenthalt in beheizten oder klimatisierten Räumen – all das beeinträchtigt den Komfort eines freien Atems, was besonders beim Schlafen und Essen störend ist. Die Folgen einer unzureichenden Behandlung von Nase und Nebenhöhlen können ernst sein – trockene Schleimhäute bieten einen idealen Nährboden für die Entwicklung von Infektionen.

NOICLA® ALOE+ besteht aus isotonischem Meerwasser, das aus den Tiefen des Atlantischen Ozeans stammt. Zusätzlich befeuchtet NOICLA® ALOE+ mit Hyaluronsäure und Aloe-Extrakt intensiv die trockene und gereizte Schleimhaut der Nase und Nebenhöhlen.

NOICLA® ALOE+ ist für die tägliche Hygiene gedacht, um die normalen Funktionen der Nase und Nebenhöhlen zu erhalten und die Schleimhaut von Nase und Nebenhöhlen zu befeuchten, sowohl bei Rhinitis als auch bei Sinusitis, die durch Infektionen und Allergien verursacht werden. Es ist auch die ideale Lösung für Menschen, die aufgrund verschiedener Ursachen (z. B. Aufenthalt in klimatisierten oder gerauchten Räumen) unter wiederkehrender Trockenheit der Nasen- und Nebenhöhlenschleimhaut leiden, sowie zur unterstützenden Behandlung bei der Anwendung von Tropfen gegen eine laufende Nase. Das Produkt wird ebenso für onkologische Patienten empfohlen, die unter Trockenheit und Reizung der Nasenschleimhaut leiden. Onkologische Behandlungen können Schäden an den schleimproduzierenden Zellen oder eine strahlenbedingte Rhinosinusitis verursachen.

Die isotonische Lösung aus Meerwasser verdünnt zähe Sekrete und beruhigt die Schleimhaut von Nase und Nebenhöhlen, z. B. bei Erkältungen. Sie spült Staub und Allergene weg und erleichtert das Atmen. Hyaluronsäure und Aloe-Extrakt befeuchten Nase und Nebenhöhlen intensiv. Die regelmäßige Anwendung des Produkts verbessert die Befeuchtung der Nasen- und Nebenhöhlenschleimhaut und beugt bakteriellen und viralen Infektionen sowie Allergien vor.

3. Dosierung und Anwendung

NOICLA® ALOE+ sollte gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Anwendung:

Den Deckel abnehmen, die Sprühflasche mehrere Male pumpen, um eine gleichmäßige Dosis zu erzeugen. Dann den Applikator in das Nasenloch einführen und die beiden Seiten des Applikatorfußes drücken. Nach jeder Anwendung den Applikator reinigen und den Deckel wieder aufsetzen.

Dosierung:

Säuglinge ab 6 Monaten und Kinder:

1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch 2- bis 3 Mal pro Tag

Erwachsene:

1 bis 3 Sprühstöße in jedes Nasenloch 2- bis 3 Mal pro Tag

Nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum verwenden!

NOICLA® ALOE+ Nasenspray 30 ml - Medizinprodukt

Aus hygienischen Gründen und um eine mögliche Übertragung von Infektionen zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt nur von einer Person verwenden zu lassen.

Um die Eigenschaften des Produkts zu bewahren, sollte der Applikator nicht manipuliert werden. Nach jeder Anwendung den Applikator mit Seife reinigen und anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen. Die Sprühflasche enthält kleine Teile, daher außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Bei gereizten Nasenschleimhäuten kann während der Anwendung von NOICLA® ALOE+ ein brennendes Gefühl auftreten, was ein normales Symptom ist, das bei der Verwendung von Produkten mit Meersalz auftreten kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker!

4. Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den Inhaltsstoffen des Produkts

5. Lagerbedingungen

In der Originalverpackung bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) lagern!

6. Zusammensetzung

Meerwasser, Natriumhyaluronat, Aloe Barbadensis-Extrakt (Aloe Barbadensis), demineralisiertes Wasser

7. Packungsbeschreibung

NOICLA® ALOE+ ist in einer Kunststoffflasche verpackt, die 30 ml Lösung enthält. Es wird ein spezieller, anatomisch geformter Applikator verwendet, der für Säuglinge und Kinder entwickelt wurde. Die Einzelverpackung enthält eine Faltschachtel, eine Flasche mit 30 ml mit Etikett und eine Gebrauchsanweisung.

**Hersteller:**

Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.,
Górników street 21/26,
30-819 Cracow, Poland
www.gofarm.pl

**Vertrieb:**

SANOVA Pharma GesmbH,
Haidestraße 4, 1110 Wien,
Österreich
www.sanova.at



Auf der Packung gezeigte Symbole:



Hersteller



Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist!



Vertrieb



Gebrauchsanweisung beachten



Chargennummer



Katalognummer



Haltbarkeitsdatum



Lagertemperatur